

BRUKSANVISNING

Graviditetskollen.nu's Tidiga Graviditetstest

Graviditetskollens tidiga graviditetstest stav är ett snabbt graviditetstest som lätt kan utföras i hemmet. Testet är 99% säkert.

HUR FUNGERAR DET?

Hormonet hCG (Humant choriongonadotropin) produceras kort efter befruktning av den växande moderkakan, och utsöndras därefter i urinet. Våra graviditetstest regagerar specifikt på detta hormon. Om koncentrationen av hCG överstiger testets känslighetsgräns (10 mIU/ml) kommer en testlinje att synas. Som kontroll för att testet utförts på rätt sätt kommer även en kontrolllinje att synas.

INNEHÅLL PER PÅSE

- En stav och ett torkmedel, för att undvika fuktskador.

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU TESTAR

Du kan utföra testet när som helst på dygnet, men den första morgonurinen är optimal eftersom den har den högsta koncentrationen av hCG. Det är även rekommenderat att du samlar upp urinen i en ren och torr behållare.

VIKTIG INFORMATION

- Läs användarinstruktionerna noggrant och lägg märke till exakt var testlinjen och kontrollinjen befinner sig.
- Använd ej efter utgångsdatum. Se bäst före datum på förpackningen.
- Återanvänd aldrig testmaterialet. Släng efter användning.
- Använd ej testmaterialet om påsen är skadad eller öppnad. Rör ej ytskiktet på teststaven.

HUR UTFÖR JAG TESTET?

- Ta ut staven ur påsen.
- Håll staven med ena handen och dra av den skyddande hylsan för att exponera uppsugningsdelen.
- Håll den absorberande delen av testet nedåt och för in den i urinstrålen så att den blir ordentligt fuktad, i minst 10 sekunder. Det fungerar även att doppa staven i urin som är uppsamlat i en ren behållare. **OBS! Se till att urinstrålen inte träffar ovanför uppsugningsdelen.**
- Avläs resultatet inom 5 minuter. Ett positivt resultat kan visas redan efter 1 minut. **OBS! Läs inte av testet efter 5 minuter.**




AVLÄSNING AV RESULTATET

Negativ (inte gravid): Om endast en rosa linje visar sig inom kontrollzonen kan du anta att du ej är gravid.

Positiv (gravid): Om två rosa ränder visar sig inom dels kontrollzonen och testzonen inom 5 minuter, kan du anta att du är gravid. Färgstyrkan kan skifta på linjerna beroende på hCG koncentrationen i graviditetens olika stadier. **OBS! Linjer är enbart giltiga om de uppkommer inom 5 minuter. Läs ej av efter 5 minuter.**

Ogiltig: Om ingen distinkt rosa-lilafärgad linje visar sig inom kontrollzonen kan testet anses som ogiltigt. Repetera med ett nytt test. Om ytterligare ett test misslyckas kontakta vår kundsupport och uppge testets LOT-nummer. Observera att du måste spara testerna och ta bilder på testresultaten för att vi ska kunna felsöka.

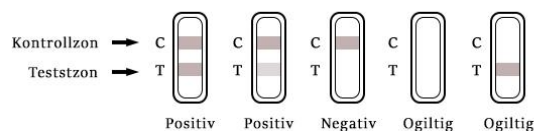

BEGRÄNSNINGAR

- Som med alla andra diagnostiska tester, kan en definitiv diagnos ej baseras på ett enda test. En definitiv diagnos bör endast göras av utbildad personal där alla faktorer har blivit utvärderade.
- Om ett urinprov är för utspätt kan det innehålla en lägre nivå av hCG. Om du misstänker graviditet bör du vänta 24-48 timmar innan ett nytt test utförs med ett nytt urinprov. I mycket tidig graviditet kan en låg koncentration av hCG medföra ett negativt resultat.
- Man kan inte diagnostisera graviditet utan att först eliminera andra tillstånd som kan orsaka förhöjda hCG nivåer.

FÖRVARING & HÅLLBARHET

- Förvara vid 4°C - 30°C i den förseglade foliepåsen fram till utgångsdatumet. Frys ej. Förvaras undan direkt solljus, fukt och hetta.
- Så fort du öppnat påsen skall testet användas. Långvarig exponering för luftfuktighet leder till att produktens pålitlighet försämras.
- Öppna inte folieförpackningen förrän du är klar att utföra testet.

OBS! Förpackningen för våra tidiga graviditetstest är väldigt lik våra vanliga stavar, men skiljer sig med hjälp av följande text på framsidan av folieförpackningen: "Sensitivity 10 mIU/ml" vilket helt enkelt betecknar testets känslighet.

FRÅGOR & SVAR

- Hur pålitliga är Graviditetskollens tester?

Enligt laboratorietester är våra tester mer än 99% säkra.

- Under plastfliken visas en linje, är testet positivt?

Under plastfliken kan ibland färgrester samlas. Denna linje är inte en testlinje.

- Testlinjen är svag, är jag gravid?

En svag testlinje betyder egentligen lika mycket som en stark testlinje, så länge testlinjen visar sig inom 5 minuter. Vänta en dag och testa igen för att se om testlinjen blir starkare.

- Vilka faktorer kan påverka testresultatet?

All form av läkemedel som innehåller hCG kan ge falskpositiva resultat t.ex. Pregnyl. Substanser som inte innehåller hCG påverkar inte testresultatet (alkohol, värktabletter, p-piller eller antibiotika).

- Vad ska jag göra om resultatet visar att jag är gravid?

Om testet visar att du är gravid bör du kontakta din barnmorska eller gynekolog för rådgivning.

- Vad ska jag göra om testet visar att jag inte är gravid?

Detta innebär att koncentrationen av hCG i ditt urin inte är tillräckligt hög för att ge utslag. Om du fortfarande misstänker graviditet eller inte fått någon mens inom en vecka, utför nytt test. Får du negativt resultat igen och menssen fortfarande uteblivit, kontakta läkare.

- En rosa bakgrundsfärg och vågräta streck visades i resultatområdet under testperioden. Är detta något jag behöver bry mig om?

Nej, det påverkar inte testresultatet. Visas kontrollinjen inom 5 minuter, fungerar testet som det skall.

Konsumentkontakt

www.graviditetskollen.nu
info@graviditetskollen.nu

Senast reviderad: 8/2016

